

# PRODUKTDATENBLATT

## SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)



<b>Produkt</b>	LEPU MEDICAL SARS-CV-2 Antigen Rapid Test Kid (Kolloidale Gold-Immunochromatographie)
<b>Artikelnr.</b>	cap-med-120
<b>Verpackungseinheit (VPE)</b>	25 Stk. Box (Mindestabnahme 100 Stk. - 4Boxen)
<b>Testverfahren</b>	Antigen Schnelltest (Nasen-Abstrichverfahren)
<b>Zulassung / Genehmigung</b>	2. September 2020, CE-InCG27 REV.06
<b>EC/REP</b>	Lepu Medical (Europe) Cooperatif U.A.
<b>Limit of Detection (LOD)</b>	2 x 10 <sup>2</sup> TCID <sub>50</sub> /ml (200 TCID 50/ml),
<b>Sensitivität / Spezifität</b>	94,37 % (97,32 % für Proben mit Ct-Werten ≤ 25) / 99,62%
<b>Listung</b>	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte >> anklicken <<
<b>Anwendungsbereich</b>	Krankenhäuser, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime
<b>Vertrieb im Auftrag der</b>	BIOCHEM Bernburg GmbH <a href="http://www.biochem-bernburg.de">www.biochem-bernburg.de</a>

CAPULUS übernimmt keine Gewährleistung/ Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Hersteller bereitgestellten Informationen und Daten. Das Produkt kann vom o.g. Bild abweichen.

### Kontakt / Bestellungen:

Tel: +49 40 307 772 15

[Produktblatt Hersteller >> hier anklicken <<](#)

E-Mail: [info@capulus-medical.de](mailto:info@capulus-medical.de)

[Konformitätserklärung >> hier anklicken <<](#)

Anfragen: Bestellformular Geschäftskunden


[Klinikvalidierungsbericht über IVD-Reagenzien >> hier anklicken <<](#)

Internet: [www.capulus-medical.de](http://www.capulus-medical.de)

[Bundesanzeiger Ankündigung >> hier anklicken<<](#)

Der Warenversand/-Abrechnung erfolgt über die BIOCHEM Bernburg GmbH, Neuer Weg 1 – 06406 Bernburg. Die BIOCHEM Bernburg GmbH ist nach ISO 13485 zertifiziert.

# TEST IM ÜBERBLICK



The image shows the packaging for the SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit. The top of the box features the LEPU MEDICAL logo. The main title is "SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)". Below the title, there is a diagram of the test strip with two result windows labeled (+) Positive and (-) Negative. At the bottom of the box, there is a QR code and the text "SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)".

**LEPU MEDICAL**

## SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

(Colloidal Gold Immunochromatography)

- Non-invasive
- Simple to use
- Convenient, no devices required
- Rapid, get result in 15 minutes
- Stable, with high accuracy
- Inexpensive, cost-efficiency


**SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit**  
(Colloidal Gold Immunochromatography)

**Hospital** **Test site** **Airport** **Station** **Hotel** **Corporation** **Mass Screening**



# EINFACHE BEDIENUNG


## Anleitung

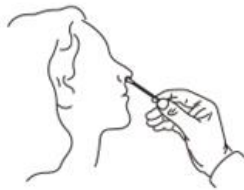


Schritt 1: Entnehmen Sie die Probe anhand des beiliegenden Stäbchens.



Schritt 2: Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Klebestreifens.

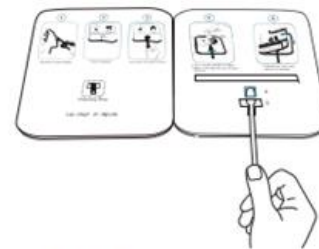

Schritt 3: Schieben Sie die Probe durch die Öffnung von Vertiefung B in Vertiefung A.

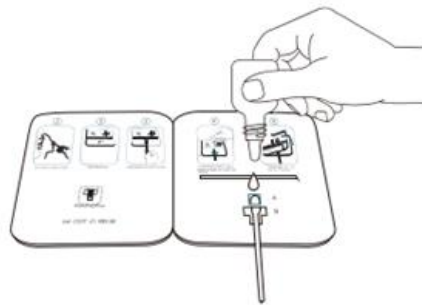

Schritt 4: Geben Sie 6 Tropfen Verdünnungsmittel in Vertiefung A. Drehen Sie den Abstrich 2x in jede Richtung.




Schritt 5: Kleben Sie die linke und rechte Seite zusammen. Das Testergebnis wird in 15 Minuten angezeigt.

## Ergebnisinterpretation

**Positiv**

(+)

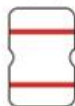


**Negativ**

(-)



**Falsch**

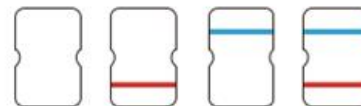

**BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.**

Building 7-1 No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200, P.R.China

Tel: +86-10-8012 3964

Email: lepuservice@lepumedical.com

Web: en.lepumedical.com

# HANDHABUNG IM VERGLEICH

Booklet-Architektur minimiert die Exposition des Personals

Antigen Test Mitbewerber



Antigen Test Mitbewerber

